



FLÄCHEN WISCHDESINFIZIEREN: AM BEISPIEL EINER ÜBUNGSPUPPE

Wichtig ist, dass...

- ✓ Mittel genutzt werden, die die Flächen nicht schädigen (S. 22).
- ✓ die Einwirkzeit beachtet wird: bei Zwischendesinfektionen nach der Auftröcknung, bei der Abschlussdesinfektion (z.B. Ende einer Sitzung/ Übung): nach Herstellerangaben.

TORSO

Haltbarkeit prüfen (i.d.R. 3 Monate nach Anbruch).

Ein vorgetränktes Wischtuch aus der Verpackung entnehmen.

Handschuhe tragen.



1

Tuch ausbreiten und in eine Hand nehmen.

Mit der anderen Hand die Übungspuppe (oder Gegenstand) fixieren.



2

Oberfläche (Brusthaut) mit **leichtem Druck** abwischen (= Scheuer-Wischdesinfektion)

Oben beginnend von einer zu anderen Seite wischen...



3

...und dabei in **Schlanglinien** verfahren.

Anschließend Tuch wenden. Mit der unbenutzten Tuchseite von oben nach unten nochmals die ganze Fläche wischen



4

Prüfen, ob alle Stellen der Oberfläche benetzt sind.

Tuch dann **sofort** entsorgen. Ggf. separaten Beutel nutzen



5

MASKE

(NUR SOFERN NOTWENDIG)

Neues Wischtuch aus der Verpackung entnehmen.

Tuch ausbreiten und in eine Hand nehmen.



1

Wischtuch falten.

Von oben nach unten und von rechts nach links die gesamte Fläche der Maske mit leichtem Druck abwischen.



2

Dabei besonders nochmals auf Kontaktstellen achten:

- ✓ Ohren (Fingerkontakt)
- ✓ Nase und um den Mund - auch in den Öffnungen wischen!

Dazu die Tuchhälfte zuerst wenden.



3

Abschließend die inneliegende, unbenutzte Tuchseite nehmen und das Tuch **60 Sekunden** über Mund und Nase legen und andrücken.

Danach: Weiter zu 5.



4

ZUM SCHLUSS:

Handschuhe sicher ausziehen und Hände desinfizieren.

Mittel auf trocknen lassen.